

Sammelröhrchen für Stuhlproben

Bestimmungsgemässer Gebrauch


Transportröhrchen ohne Medium für den Transport von Stuhlproben.

Lagerung und Haltbarkeit

Röhrchen ohne Probenmaterial können zwischen 15°C und 30°C gelagert werden. Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Verfalldatums. Nach Anbruch der Verpackungseinheit können die ungeöffneten Röhrchen bei sachgemäßer Lagerung bis zum Erreichen des Verfalldatums verwendet werden.

Gewinnung von Stuhlproben

- ① Ungefülltes Probenröhrchen.
- ② Beschriften des Probenröhrchens.
- ③ Die Stuhlprobe sofort nach der Gewinnung mit dem Löffel in das Transportröhrchen überführen. Eine Probenmenge entsprechend der Löffelgröße ist ausreichend. Es wird empfohlen ca. 5 g Material einzusenden. Bei Verdacht auf Parasitenbefall im Darm mind. 3 Stuhlproben, im Abstand von 1-3 Tagen.
- ④ Verschließen des Probenröhrchens.

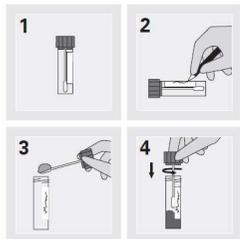

Die Proben können bei Raumtemperatur (15°C – 25°C) versandt werden.

Entsorgung

Es liegt in der Verantwortung jedes Labors, die entstandenen Abfälle in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht zu entsorgen.

Warnhinweis und Vorsichtsmassnahmen

Nur für den professionellen Gebrauch. Bei Anzeichen von mikrobieller Kontamination, Verfärbung, Rissen oder sonstigen Anzeichen von Produktverfall nicht verwenden und fachgerecht entsorgen.

Hinweis zu Meldungen

Es muss eine Meldung an die zuständige Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender niedergelassen ist, sowie an den Hersteller erfolgen, sollte es im Zusammenhang mit diesem Produkt zu einem schwerwiegenden Vorfall gekommen sein.

Abkürzungen / Symbole

Symbol	Bedeutung
	Artikelnummer
	In-vitro-Diagnostikum
	Ausreichend für <n> Prüfungen
	Hersteller
	Temperaturbegrenzung
	Verwendbar bis
	Fertigungslotnummer, Charge
	Gebrauchsanweisung beachten
	Nicht wiederverwenden
	CE-Kennzeichnung